

# POLYPERF® SAFE

## EINHAND-SICHERHEITS-HUBERNADEL-SET



Die POLYPERF® SAFE Sicherheits-Hubernadel mit Verlängerung bietet **höchste Sicherheit** für medizinisches Personal und Patienten, **einfachste Handhabung** und **Tragekomfort** für den Patienten.


- **Sicherheit** zu 100%. Keine Gefahr sich an einer infizierten Nadel zu verletzen. Keine Berührung der benutzten Nadel möglich
- Die Nadel kann mit **einer Hand** herausgezogen werden, während die andere Hand durch Flüssigkeitsinjektion einen **positiven Druck** im Port aufbaut; der optimale Weg, Katheterverschlüsse zu vermeiden
- Durchgehende **Sichtbarkeit** der Injektionsstelle. Infektionen an der Einstichstelle oder am Port fallen sofort auf
- **Schaumkissen** zur Schonung der Haut und Stabilisierung der Nadel

| Farbcode | Gauge | Ø der Nadel (mm) | Länge der Nadel (mm) | Code ohne Y-Stück | Code mit Y-Stück | PZN     |
|----------|-------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------|
| ■        | 22G   | 0,7              | 17                   | 601707            |                  | 6682905 |
| ■        | 22G   | 0,7              | 20                   | 602007            |                  | 6682911 |
| ■        | 22G   | 0,7              | 20                   |                   | 612007           | 6683000 |
| ■        | 22G   | 0,7              | 25                   | 602507            |                  | 6683023 |
| ■        | 22G   | 0,7              | 25                   |                   | 612507           | 6683098 |
| ■        | 22G   | 0,7              | 30                   | 603007            |                  | 6683135 |
| ■        | 22G   | 0,7              | 35                   | 603507            |                  | 6683164 |
| ■        | 20G   | 0,9              | 17                   | 601709            |                  | 6682383 |
| ■        | 20G   | 0,9              | 20                   | 602009            |                  | 6682503 |
| ■        | 20G   | 0,9              | 20                   |                   | 612009           | 6682561 |
| ■        | 20G   | 0,9              | 25                   | 602509            |                  | 6682615 |
| ■        | 20G   | 0,9              | 25                   |                   | 612509           | 6682621 |
| ■        | 20G   | 0,9              | 30                   | 603009            |                  | 6682638 |
| ■        | 20G   | 0,9              | 35                   | 603509            |                  | 6682851 |
| ■        | 19G   | 1,1              | 17                   | 601711            |                  | 6682182 |
| ■        | 19G   | 1,1              | 20                   | 602011            |                  | 6682236 |
| ■        | 19G   | 1,1              | 20                   |                   | 612011           | 6682242 |
| ■        | 19G   | 1,1              | 25                   | 602511            |                  | 6682265 |
| ■        | 19G   | 1,1              | 25                   |                   | 612511           | 6682348 |
| ■        | 19G   | 1,1              | 30                   | 603011            |                  | 6682360 |
| ■        | 19G   | 1,1              | 35                   | 603511            |                  | 6682377 |

Packungseinheit: 12 Stück



Die POLYPERF® SAFE Sicherheits-Hubernadel ist auch in der Ausführung mit einem Luer-Lock Y-Stück und zwei Klemmen erhältlich.

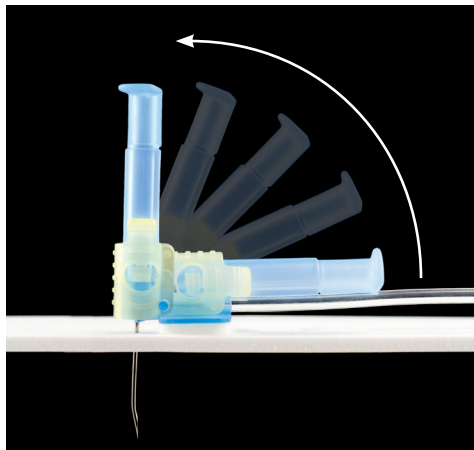

Nach Hochklappen des Griffs lässt sich die Nadel mit einer Hand herausziehen




Beim Herausziehen schiebt sich die Nadel in den Tubus des Griffs. Ein Berühren der Nadel ist nicht möglich.


# GEBRAUCHSANWEISUNG




Die POLYPERF® SAFE Sicherheits-Hubernadel aus der Verpackung nehmen, die Plastikhülse von der Nadel abstreifen und wie üblich Port nach sorgsamer Hautdesinfektion punktieren. Bei längerem Verweilen der Kanüle empfiehlt es sich, das System mit durchsichtiger, atmungsaktiver Klebefolie abzudecken.

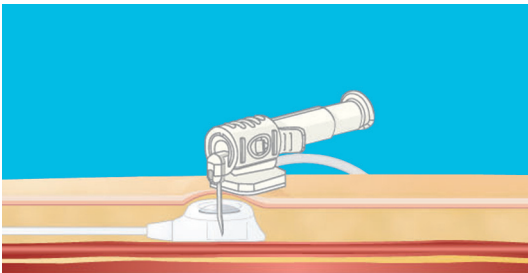


Normale Stellung der POLYPERF® SAFE Sicherheits-Hubernadel.

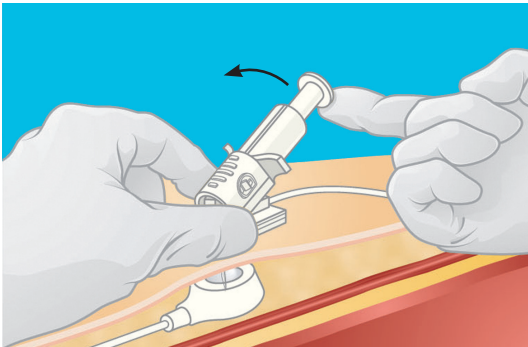

Zum Entfernen Griff von der waagerechten in die senkrechte Stellung bringen. Dieser rastet mit einem leichten Klick ein.

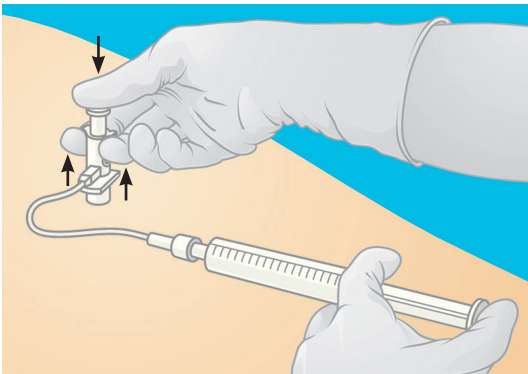

Mit dem Daumen Kolben herunterdrücken, bis er die Haut berührt. Gleichzeitig mit Zeigefinger und Mittelfinger Extraktor nach oben ziehen bis zum hör- und fühlbaren Einrasten der Nadel. Diese Aktion eliminiert das Risiko einer akzidentellen Nadelstichverletzung. Während der Herausnahme der Nadel empfiehlt es sich mit der anderen Hand übliche Katheterspülflüssigkeit zu injizieren, um im Port einen positiven Druck auszuüben und so einen Blutrückfluss an der Katheterspitze zu verhindern. Nadel in das für scharfe Gegenstände bestimmte Behältnis entsorgen.

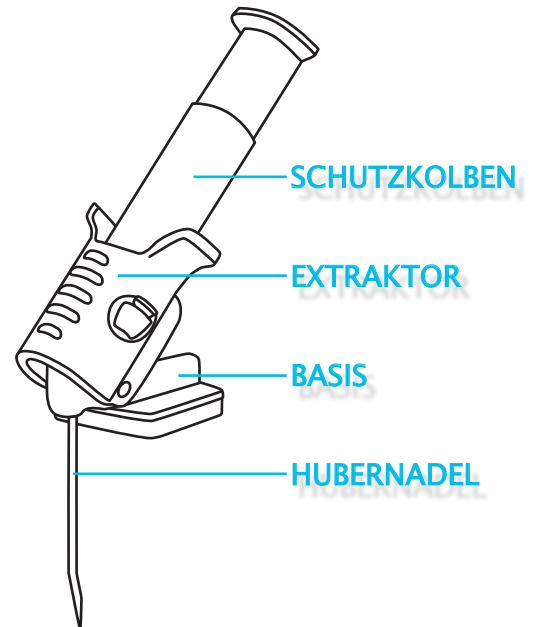

CE 0459 Latex-frei und DEHP-frei



## PROMECON

PROMECON GmbH  
Admiralitätstraße 60 - D-20459 Hamburg  
Tel.: +49 40 3690 1690 - Fax: +49 40 3690 1699  
Mail: [info@promecon-pharma.de](mailto:info@promecon-pharma.de)  
[www.promecon-pharma.de](http://www.promecon-pharma.de)  
Sitz Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRB 66510  
Geschäftsführer Jörn Wiemann